

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“益脊司”椎弓螺釘系統	申請醫療器材商	尚品醫療器材股份有限公司
--------	-------------	---------	--------------



“益脊司”椎弓螺釘系統 衛部醫器製字第 007373 號

“EZ Spine” Pedicle Screw Spinal System

品名：多軸向中空骨釘 規格：Ø6.5 L45 材質：Ti-6Al-4V ELI



REF 11B65045

LOT AA01A

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD






醫療器材商/製造業者名稱：尚品醫療器材股份有限公司
 醫療器材商/製造業者地址：新北市中和區立德街170號7樓
 (01)04719883290045(17)YYMMDD(10)AA01A 料號 AIC35080T 版次 B

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核，

“益脊司” 椎弓螺釘系統 “EZ Spine” Pedicle Screw Spinal System

衛部醫器製字第 007373 號

使用前務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

■ 產品敘述

本產品為一套用於脊椎手術之固定系統，是由連接桿(Rod)、椎弓根螺釘(Pedicle Screw)、鎖固螺絲(Set Screw)以及配件側桿(Side Rod)、連接塊(Connector)、連接器(Link)、鉤(Hook)等組件構成。本產品具有各種不同尺寸可選用，以符合不同患者之需求。其中骨鬆釘系列適用於骨質疏鬆患者。所有組件皆為符合 ASTM F136 與 ISO5832-3 規範之鈦六鋁四鈮合金(Ti-6Al-4V)所製成。

■ 適應症

A. 本產品用於固定非頸椎的脊柱，本產品的多軸向中空骨鬆釘及多軸向中空長杯骨鬆釘，適用於下列適應症：

1. 退化性椎間盤疾病(定義為起源於椎間盤之疼痛，且經由病史與放射線攝影檢查確認椎間盤退化)。
2. 脊椎滑脫。
3. 壓迫性骨折。
4. 脊椎病變呈不穩定。
5. 腫瘤。
6. 椎孔狹窄。
7. 假關節。
8. 脊柱畸形(如脊椎側彎、脊柱後凸畸形和、或前凸)
9. 骨質疏鬆(建議骨鬆釘系列搭配骨水泥使用)。

B. 本產品用於固定非頸椎的脊柱，本產品的多軸向骨釘、多軸向中空骨釘、多軸向長杯骨釘及多軸向中空長杯骨釘，適用於下列適應症：

1. 退化性椎間盤疾病(定義為起源於椎間盤之疼痛，且經由病史與放射線攝影檢查確認椎間盤退化)。
2. 脊椎滑脫。
3. 壓迫性骨折。
4. 脊椎病變呈不穩定。
5. 腫瘤。
6. 椎孔狹窄。
7. 假關節。
8. 脊柱畸形(如脊椎側彎、脊柱後凸畸形和、或前凸)

■ 禁忌症


本產品並非涵蓋所有狀況，下列禁忌症將由醫師視部分或全部考量因素決定是否進行手術：

1. 創傷或病灶之椎體有感染之症狀。
2. 骨頭發育不完全或骨質異常，不能確保脊椎釘之固定。
3. 開放性創傷。
4. 對植入物材質有過敏者。

■ 副作用與併發症

醫師手術前，應將下列可能發生的不良反應告知病患。

- A. 硬脊膜破裂。
- B. 感染。
- C. 植入物彎曲或斷裂。
- D. 對植入物材質引起過敏反應。

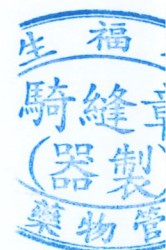

- E. 因手術創傷，造成神經損傷。
- F. 植入物之抗力作用，導致骨密度降低。
- G. 早期植入物鬆脫
- H. 術後脊椎變形
- I. 神經受損
- J. 出血
- K. 影響日常生活行動
- L. 不融合或延遲融合
- M. 死亡
- N. 癱瘓

■ 滅菌方式

本產品為非滅菌產品，使用前須拆除包裝袋，經高溫高壓滅菌後，方可使用。滅菌不完全可能導致感染。滅菌條件如下：

滅菌參數	蒸氣循環	滅菌溫度	滅菌時間	乾燥時間
1	重力式	121℃	30min	30min
2	真空式	132℃	4min	30min

■ 儲存與管理

- A. 植入物應儲存於乾燥環境。
- B. 直到使用前，不能移除任何保護套或保護設備。
- C. 植入物應小心運送保管，避免刮傷及損壞產品。

■ 警告與注意事項

- A. 本產品須由受過專業教育訓練的專科醫師操作使用。
- B. 選擇適當手術工具進行植入，有助於手術順利進行。
- C. 植入適當的植入物尺寸，有助於穩固內固定器的穩定性，因此，正確選擇適當的植入物尺寸，可將危險性降至最小。
- D. 金屬材質的內固定器無法與正常且健康的骨骼具有相同的抗力，因此，無法預判植入物在無輔助支撐的狀況下，負荷身體重量時，何時毀壞。
- E. 如延遲癒合或不癒合，植入物可能因金屬疲乏而斷裂。骨癒合的程度、負荷、活動量與方式，都會影響植入物壽命。
- F. 手術時造成植入物上的刮痕與磨損等，皆可能造成金屬疲乏的提前發生。
- G. 混合不同材質的金屬植入物，可能導致金屬腐蝕，如鈦金屬螺絲與不鏽鋼骨板相結合，故使用內固定系統時應使用相同材質。
- H. 手術過程中應使用 X-Ray 輔助定位及復位，以減少併發症。
- I. 植入物絕不可重複使用，已使用過的植入物，於移除後應遵循當地法規，以醫療廢棄物銷毀拋棄。
- J. 產品有缺件或刮傷損壞，請勿使用。
- K. 在臨床使用前，手術醫師須充分了解該手術之各個層面，及脊椎後路固定系統之限制。本產品宜由熟悉術前/後處置、手術技術、注意事項及此類手術可能風險的醫師施行。醫師對於手術技術、適宜的復位、植入物的選擇與安裝、術前/後的病患照護處置等知識是否充分，被視為手術療效成功與否之基本要素。
- L. 植入物可能因負荷過重而塌陷進而導致延遲癒合或不癒合，因此在骨癒合正常發生前，植入物必須以分擔負重方式承受負荷。
- M. 植入物須妥善保護，防止其與其他金屬或粗糙物體接觸而產生之損傷、刮痕、凹陷，上述變化會在表面曾造成瑕疵及內部應力變化，而成為植入物斷裂之集中處。
- N. 脊椎後方固定系統包含固定桿、螺釘等植入物及一套特殊之配合器械組。除另有提示，不得使用

其他器械，以免因兩者匹配性不良導致非預期之後果。


- O. 如病患之職業或活動會對植入物招致過度應力，可能會導致植入物的失敗。
- P. 在某些案例中，退化性疾病之發展有可能過於迅速，以致減低植入物之預期使用壽命。骨科器材或植入物僅能視為一項延遲技術或提供暫時性舒緩的裝置。
- Q. 病患應當被充分告知植入物的限制，包含/不僅限於病患體重或活動之過度負荷所產生的衝擊，並須被教導合宜控制自身活動。病患應當清楚了解金屬植入物不如正常、健康的骨骼一般強壯，如過度負荷將導致植入物彎曲、變形、鬆脫或斷裂。病患如因活躍、虛弱或心智失常，以致無法使用重量支撐裝置，可能會在術後復健期間承受較大的失敗風險。
- R. 拔除未鬆脫的脊椎螺釘可能需要使用特殊器械破壞植入物表面介面，此項技術應於尚未臨床施行前先行體外實驗模擬操練之。
- S. 醫師於決定拔除植入物前，應將病患需再接受另一次手術之風險及拔除困難等因素列入考慮。
- T. 植入物拔除後需妥善照護，以防止骨折發生。
- U. U. 使用及多軸向中空長翼骨鬆釘或及多軸向中空斜長翼骨鬆釘時，應搭配填充物(骨水泥) 一併使用。

製造業者名稱：尚品醫療器材股份有限公司

製造業者地址：新北市中和區立德街 170 號 7 樓

醫療器材商名稱：尚品醫療器材股份有限公司

醫療器材商地址：「依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載」(市售品須刊載實際地址)

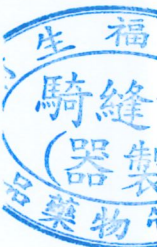

型號及規格

多軸向骨釘(Poly-axial Pedicle Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	11A45030	Ø4.5	30
	11A45035	Ø4.5	35
	11A45040	Ø4.5	40
	11A45045	Ø4.5	45
	11A50030	Ø5.0	30
	11A50035	Ø5.0	35
	11A50040	Ø5.0	40
	11A50045	Ø5.0	45
	11A50050	Ø5.0	50
	11A55030	Ø5.5	30
	11A55035	Ø5.5	35
	11A55040	Ø5.5	40
	11A55045	Ø5.5	45
	11A55050	Ø5.5	50
	11A60030	Ø6.0	30
	11A60035	Ø6.0	35
	11A60040	Ø6.0	40
	11A60045	Ø6.0	45
	11A60050	Ø6.0	50
	11A60055	Ø6.0	55
	11A60060	Ø6.0	60
	11A60065	Ø6.0	65
	11A62030	Ø6.2	30
	11A62035	Ø6.2	35
	11A62040	Ø6.2	40
	11A62045	Ø6.2	45
	11A62050	Ø6.2	50
	11A62055	Ø6.2	55
	11A62060	Ø6.2	60
	11A62065	Ø6.2	65
	11A65030	Ø6.5	30
	11A65035	Ø6.5	35
	11A65040	Ø6.5	40
	11A65045	Ø6.5	45
	11A65050	Ø6.5	50
	11A65055	Ø6.5	55
	11A65060	Ø6.5	60
	11A65065	Ø6.5	65
	11A65070	Ø6.5	70
	11A65075	Ø6.5	75
	11A65080	Ø6.5	80
	11A65085	Ø6.5	85
	11A65090	Ø6.5	90
	11A65095	Ø6.5	95
	11A65100	Ø6.5	100
	11A70030	Ø7.0	30
	11A70035	Ø7.0	35
	11A70040	Ø7.0	40
	11A70045	Ø7.0	45
	11A70050	Ø7.0	50
	11A70055	Ø7.0	55
	11A70060	Ø7.0	60
	11A70065	Ø7.0	65
	11A70070	Ø7.0	70
	11A70075	Ø7.0	75

11A70080	Ø7.0	80
11A70085	Ø7.0	85
11A70090	Ø7.0	90
11A70095	Ø7.0	95
11A70100	Ø7.0	100
11A75030	Ø7.5	30
11A75035	Ø7.5	35
11A75040	Ø7.5	40
11A75045	Ø7.5	45
11A75050	Ø7.5	50
11A75055	Ø7.5	55
11A75060	Ø7.5	60
11A75065	Ø7.5	65
11A75070	Ø7.5	70
11A75075	Ø7.5	75
11A75080	Ø7.5	80
11A75085	Ø7.5	85
11A75090	Ø7.5	90
11A75095	Ø7.5	95
11A75100	Ø7.5	100
11A80030	Ø8.0	30
11A80035	Ø8.0	35
11A80040	Ø8.0	40
11A80045	Ø8.0	45
11A80050	Ø8.0	50
11A80055	Ø8.0	55
11A80060	Ø8.0	60
11A80065	Ø8.0	65
11A80070	Ø8.0	70
11A80075	Ø8.0	75
11A80080	Ø8.0	80
11A80085	Ø8.0	85
11A80090	Ø8.0	90
11A80095	Ø8.0	95
11A80100	Ø8.0	100
11A80110	Ø8.0	110
11A80120	Ø8.0	120
11A80130	Ø8.0	130
11A85030	Ø8.5	30
11A85035	Ø8.5	35
11A85040	Ø8.5	40
11A85045	Ø8.5	45
11A85050	Ø8.5	50
11A85055	Ø8.5	55
11A85060	Ø8.5	60
11A85065	Ø8.5	65
11A85070	Ø8.5	70
11A85075	Ø8.5	75
11A85080	Ø8.5	80
11A85085	Ø8.5	85
11A85090	Ø8.5	90
11A85095	Ø8.5	95
11A85100	Ø8.5	100
11A85110	Ø8.5	110
11A85120	Ø8.5	120
11A85130	Ø8.5	130



■ 多軸向骨釘 (無陽極處理) (Poly-axial Pedicle Screw (no anodic treatment))			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	11D45030	Ø4.5	30
	11D45035	Ø4.5	35
	11D45040	Ø4.5	40
	11D45045	Ø4.5	45
	11D50030	Ø5.0	30
	11D50035	Ø5.0	35
	11D50040	Ø5.0	40
	11D50045	Ø5.0	45
	11D50050	Ø5.0	50
	11D55030	Ø5.5	30
	11D55035	Ø5.5	35
	11D55040	Ø5.5	40
	11D55045	Ø5.5	45
	11D55050	Ø5.5	50
	11D60030	Ø6.0	30
	11D60035	Ø6.0	35
	11D60040	Ø6.0	40
	11D60045	Ø6.0	45
	11D60050	Ø6.0	50
	11D60055	Ø6.0	55
	11D60060	Ø6.0	60
	11D60065	Ø6.0	65
	11D62030	Ø6.2	30
	11D62035	Ø6.2	35
	11D62040	Ø6.2	40
	11D62045	Ø6.2	45
	11D62050	Ø6.2	50
	11D62055	Ø6.2	55
	11D62060	Ø6.2	60
	11D62065	Ø6.2	65
	11D65030	Ø6.5	30
	11D65035	Ø6.5	35
	11D65040	Ø6.5	40
	11D65045	Ø6.5	45
	11D65050	Ø6.5	50
	11D65055	Ø6.5	55
	11D65060	Ø6.5	60
	11D65065	Ø6.5	65
	11D65070	Ø6.5	70
	11D65075	Ø6.5	75
	11D65080	Ø6.5	80
	11D65085	Ø6.5	85
	11D65090	Ø6.5	90
	11D65095	Ø6.5	95
	11D65100	Ø6.5	100
	11D70030	Ø7.0	30
	11D70035	Ø7.0	35
	11D70040	Ø7.0	40
	11D70045	Ø7.0	45
	11D70050	Ø7.0	50
	11D70055	Ø7.0	55
	11D70060	Ø7.0	60
	11D70065	Ø7.0	65
	11D70070	Ø7.0	70
	11D70075	Ø7.0	75
	11D70080	Ø7.0	80

11D70085	Ø7.0	85
11D70090	Ø7.0	90
11D70095	Ø7.0	95
11D70100	Ø7.0	100
11D75030	Ø7.5	30
11D75035	Ø7.5	35
11D75040	Ø7.5	40
11D75045	Ø7.5	45
11D75050	Ø7.5	50
11D75055	Ø7.5	55
11D75060	Ø7.5	60
11D75065	Ø7.5	65
11D75070	Ø7.5	70
11D75075	Ø7.5	75
11D75080	Ø7.5	80
11D75085	Ø7.5	85
11D75090	Ø7.5	90
11D75095	Ø7.5	95
11D75100	Ø7.5	100
11D80030	Ø8.0	30
11D80035	Ø8.0	35
11D80040	Ø8.0	40
11D80045	Ø8.0	45
11D80050	Ø8.0	50
11D80055	Ø8.0	55
11D80060	Ø8.0	60
11D80065	Ø8.0	65
11D80070	Ø8.0	70
11D80075	Ø8.0	75
11D80080	Ø8.0	80
11D80085	Ø8.0	85
11D80090	Ø8.0	90
11D80095	Ø8.0	95
11D80100	Ø8.0	100
11D80110	Ø8.0	110
11D80120	Ø8.0	120
11D80130	Ø8.0	130
11D85030	Ø8.5	30
11D85035	Ø8.5	35
11D85040	Ø8.5	40
11D85045	Ø8.5	45
11D85050	Ø8.5	50
11D85055	Ø8.5	55
11D85060	Ø8.5	60
11D85065	Ø8.5	65
11D85070	Ø8.5	70
11D85075	Ø8.5	75
11D85080	Ø8.5	80
11D85085	Ø8.5	85
11D85090	Ø8.5	90
11D85095	Ø8.5	95
11D85100	Ø8.5	100
11D85110	Ø8.5	110
11D85120	Ø8.5	120
11D85130	Ø8.5	130



多軸向中空骨釘(Poly-axial Cannulated Pedicle Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	11B45030	Ø4.5	30
	11B45035	Ø4.5	35
	11B45040	Ø4.5	40
	11B45045	Ø4.5	45
	11B50030	Ø5.0	30
	11B50035	Ø5.0	35
	11B50040	Ø5.0	40
	11B50045	Ø5.0	45
	11B50050	Ø5.0	50
	11B55030	Ø5.5	30
	11B55035	Ø5.5	35
	11B55040	Ø5.5	40
	11B55045	Ø5.5	45
	11B55050	Ø5.5	50
	11B60030	Ø6.0	30
	11B60035	Ø6.0	35
	11B60040	Ø6.0	40
	11B60045	Ø6.0	45
	11B60050	Ø6.0	50
	11B60055	Ø6.0	55
	11B60060	Ø6.0	60
	11B60065	Ø6.0	65
	11B62030	Ø6.2	30
	11B62035	Ø6.2	35
	11B62040	Ø6.2	40
	11B62045	Ø6.2	45
	11B62050	Ø6.2	50
	11B62055	Ø6.2	55
	11B62060	Ø6.2	60
	11B62065	Ø6.2	65
	11B65030	Ø6.5	30
	11B65035	Ø6.5	35
	11B65040	Ø6.5	40
	11B65045	Ø6.5	45
	11B65050	Ø6.5	50
	11B65055	Ø6.5	55
	11B65060	Ø6.5	60
	11B65065	Ø6.5	65
	11B65070	Ø6.5	70
	11B65075	Ø6.5	75
	11B65080	Ø6.5	80
	11B65085	Ø6.5	85
	11B65090	Ø6.5	90
	11B65095	Ø6.5	95
	11B65100	Ø6.5	100
	11B70030	Ø7.0	30
	11B70035	Ø7.0	35
	11B70040	Ø7.0	40
	11B70045	Ø7.0	45
	11B70050	Ø7.0	50
	11B70055	Ø7.0	55
	11B70060	Ø7.0	60
	11B70065	Ø7.0	65
	11B70070	Ø7.0	70
	11B70075	Ø7.0	75
	11B70080	Ø7.0	80
	11B70085	Ø7.0	85

11B70090	Ø7.0	90
11B70095	Ø7.0	95
11B70100	Ø7.0	100
11B75030	Ø7.5	30
11B75035	Ø7.5	35
11B75040	Ø7.5	40
11B75045	Ø7.5	45
11B75050	Ø7.5	50
11B75055	Ø7.5	55
11B75060	Ø7.5	60
11B75065	Ø7.5	65
11B75070	Ø7.5	70
11B75075	Ø7.5	75
11B75080	Ø7.5	80
11B75085	Ø7.5	85
11B75090	Ø7.5	90
11B75095	Ø7.5	95
11B75100	Ø7.5	100
11B80030	Ø8.0	30
11B80035	Ø8.0	35
11B80040	Ø8.0	40
11B80045	Ø8.0	45
11B80050	Ø8.0	50
11B80055	Ø8.0	55
11B80060	Ø8.0	60
11B80065	Ø8.0	65
11B80070	Ø8.0	70
11B80075	Ø8.0	75
11B80080	Ø8.0	80
11B80085	Ø8.0	85
11B80090	Ø8.0	90
11B80095	Ø8.0	95
11B80100	Ø8.0	100
11B80110	Ø8.0	110
11B80120	Ø8.0	120
11B80130	Ø8.0	130
11B85030	Ø8.5	30
11B85035	Ø8.5	35
11B85040	Ø8.5	40
11B85045	Ø8.5	45
11B85050	Ø8.5	50
11B85055	Ø8.5	55
11B85060	Ø8.5	60
11B85065	Ø8.5	65
11B85070	Ø8.5	70
11B85075	Ø8.5	75
11B85080	Ø8.5	80
11B85085	Ø8.5	85
11B85090	Ø8.5	90
11B85095	Ø8.5	95
11B85100	Ø8.5	100
11B85110	Ø8.5	110
11B85120	Ø8.5	120
11B85130	Ø8.5	130

福利
縫章
製
物管
7.03

多軸向中空骨鬆釘(Poly-axial Cannulated Bone Cement Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	11C45030	Ø4.5	30
	11C45035	Ø4.5	35
	11C45040	Ø4.5	40
	11C45045	Ø4.5	45
	11C50030	Ø5.0	30
	11C50035	Ø5.0	35
	11C50040	Ø5.0	40
	11C50045	Ø5.0	45
	11C50050	Ø5.0	50
	11C55030	Ø5.5	30
	11C55035	Ø5.5	35
	11C55040	Ø5.5	40
	11C55045	Ø5.5	45
	11C55050	Ø5.5	50
	11C60030	Ø6.0	30
	11C60035	Ø6.0	35
	11C60040	Ø6.0	40
	11C60045	Ø6.0	45
	11C60050	Ø6.0	50
	11C60055	Ø6.0	55
	11C60060	Ø6.0	60
	11C60065	Ø6.0	65
	11C62030	Ø6.2	30
	11C62035	Ø6.2	35
	11C62040	Ø6.2	40
	11C62045	Ø6.2	45
	11C62050	Ø6.2	50
	11C62055	Ø6.2	55
	11C62060	Ø6.2	60
	11C62065	Ø6.2	65
	11C65030	Ø6.5	30
	11C65035	Ø6.5	35
	11C65040	Ø6.5	40
	11C65045	Ø6.5	45
	11C65050	Ø6.5	50
	11C65055	Ø6.5	55
	11C65060	Ø6.5	60
	11C65065	Ø6.5	65
	11C65070	Ø6.5	70
	11C65075	Ø6.5	75
	11C65080	Ø6.5	80
	11C65085	Ø6.5	85
	11C65090	Ø6.5	90
	11C65095	Ø6.5	95
	11C65100	Ø6.5	100
	11C70030	Ø7.0	30
	11C70035	Ø7.0	35
	11C70040	Ø7.0	40
	11C70045	Ø7.0	45
	11C70050	Ø7.0	50
	11C70055	Ø7.0	55
	11C70060	Ø7.0	60
	11C70065	Ø7.0	65
	11C70070	Ø7.0	70
	11C70075	Ø7.0	75
	11C70080	Ø7.0	80

11C70085	Ø7.0	85
11C70090	Ø7.0	90
11C70095	Ø7.0	95
11C70100	Ø7.0	100
11C75030	Ø7.5	30
11C75035	Ø7.5	35
11C75040	Ø7.5	40
11C75045	Ø7.5	45
11C75050	Ø7.5	50
11C75055	Ø7.5	55
11C75060	Ø7.5	60
11C75065	Ø7.5	65
11C75070	Ø7.5	70
11C75075	Ø7.5	75
11C75080	Ø7.5	80
11C75085	Ø7.5	85
11C75090	Ø7.5	90
11C75095	Ø7.5	95
11C75100	Ø7.5	100
11C80030	Ø8.0	30
11C80035	Ø8.0	35
11C80040	Ø8.0	40
11C80045	Ø8.0	45
11C80050	Ø8.0	50
11C80055	Ø8.0	55
11C80060	Ø8.0	60
11C80065	Ø8.0	65
11C80070	Ø8.0	70
11C80075	Ø8.0	75
11C80080	Ø8.0	80
11C80085	Ø8.0	85
11C80090	Ø8.0	90
11C80095	Ø8.0	95
11C80100	Ø8.0	100
11C80110	Ø8.0	110
11C80120	Ø8.0	120
11C80130	Ø8.0	130
11C85030	Ø8.5	30
11C85035	Ø8.5	35
11C85040	Ø8.5	40
11C85045	Ø8.5	45
11C85050	Ø8.5	50
11C85055	Ø8.5	55
11C85060	Ø8.5	60
11C85065	Ø8.5	65
11C85070	Ø8.5	70
11C85075	Ø8.5	75
11C85080	Ø8.5	80
11C85085	Ø8.5	85
11C85090	Ø8.5	90
11C85095	Ø8.5	95
11C85100	Ø8.5	100
11C85110	Ø8.5	110
11C85120	Ø8.5	120
11C85130	Ø8.5	130

多軸向長杯骨釘(Poly-axial Reduction Pedicle Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	12A45030	Ø4.5	30
	12A45035	Ø4.5	35
	12A45040	Ø4.5	40
	12A45045	Ø4.5	45
	12A50030	Ø5.0	30
	12A50035	Ø5.0	35
	12A50040	Ø5.0	40
	12A50045	Ø5.0	45
	12A50050	Ø5.0	50
	12A55030	Ø5.5	30
	12A55035	Ø5.5	35
	12A55040	Ø5.5	40
	12A55045	Ø5.5	45
	12A55050	Ø5.5	50
	12A60030	Ø6.0	30
	12A60035	Ø6.0	35
	12A60040	Ø6.0	40
	12A60045	Ø6.0	45
	12A60050	Ø6.0	50
	12A60055	Ø6.0	55
	12A60060	Ø6.0	60
	12A60065	Ø6.0	65
	12A62030	Ø6.2	30
	12A62035	Ø6.2	35
	12A62040	Ø6.2	40
	12A62045	Ø6.2	45
	12A62050	Ø6.2	50
	12A62055	Ø6.2	55
	12A62060	Ø6.2	60
	12A62065	Ø6.2	65
	12A65030	Ø6.5	30
	12A65035	Ø6.5	35
	12A65040	Ø6.5	40
	12A65045	Ø6.5	45
	12A65050	Ø6.5	50
	12A65055	Ø6.5	55
	12A65060	Ø6.5	60
	12A65065	Ø6.5	65
	12A65070	Ø6.5	70
	12A65075	Ø6.5	75
	12A65080	Ø6.5	80
	12A65085	Ø6.5	85
	12A65090	Ø6.5	90
	12A65095	Ø6.5	95
	12A65100	Ø6.5	100
	12A70030	Ø7.0	30
	12A70035	Ø7.0	35
	12A70040	Ø7.0	40
	12A70045	Ø7.0	45
	12A70050	Ø7.0	50
	12A70055	Ø7.0	55
	12A70060	Ø7.0	60
	12A70065	Ø7.0	65
	12A70070	Ø7.0	70
	12A70075	Ø7.0	75
	12A70080	Ø7.0	80
	12A70085	Ø7.0	85

12A70090	Ø7.0	90
12A70095	Ø7.0	95
12A70100	Ø7.0	100
12A75030	Ø7.5	30
12A75035	Ø7.5	35
12A75040	Ø7.5	40
12A75045	Ø7.5	45
12A75050	Ø7.5	50
12A75055	Ø7.5	55
12A75060	Ø7.5	60
12A75065	Ø7.5	65
12A75070	Ø7.5	70
12A75075	Ø7.5	75
12A75080	Ø7.5	80
12A75085	Ø7.5	85
12A75090	Ø7.5	90
12A75095	Ø7.5	95
12A75100	Ø7.5	100
12A80030	Ø8.0	30
12A80035	Ø8.0	35
12A80040	Ø8.0	40
12A80045	Ø8.0	45
12A80050	Ø8.0	50
12A80055	Ø8.0	55
12A80060	Ø8.0	60
12A80065	Ø8.0	65
12A80070	Ø8.0	70
12A80075	Ø8.0	75
12A80080	Ø8.0	80
12A80085	Ø8.0	85
12A80090	Ø8.0	90
12A80095	Ø8.0	95
12A80100	Ø8.0	100
12A80110	Ø8.0	110
12A80120	Ø8.0	120
12A80130	Ø8.0	130
12A85030	Ø8.5	30
12A85035	Ø8.5	35
12A85040	Ø8.5	40
12A85045	Ø8.5	45
12A85050	Ø8.5	50
12A85055	Ø8.5	55
12A85060	Ø8.5	60
12A85065	Ø8.5	65
12A85070	Ø8.5	70
12A85075	Ø8.5	75
12A85080	Ø8.5	80
12A85085	Ø8.5	85
12A85090	Ø8.5	90
12A85095	Ø8.5	95
12A85100	Ø8.5	100
12A85110	Ø8.5	110
12A85120	Ø8.5	120
12A85130	Ø8.5	130

多軸向中空長杯骨釘(Poly-axial Cannulated Reduction Pedicle Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	12B45030	Ø4.5	30
	12B45035	Ø4.5	35
	12B45040	Ø4.5	40
	12B45045	Ø4.5	45
	12B50030	Ø5.0	30
	12B50035	Ø5.0	35
	12B50040	Ø5.0	40
	12B50045	Ø5.0	45
	12B50050	Ø5.0	50
	12B55030	Ø5.5	30
	12B55035	Ø5.5	35
	12B55040	Ø5.5	40
	12B55045	Ø5.5	45
	12B55050	Ø5.5	50
	12B60030	Ø6.0	30
	12B60035	Ø6.0	35
	12B60040	Ø6.0	40
	12B60045	Ø6.0	45
	12B60050	Ø6.0	50
	12B60055	Ø6.0	55
	12B60060	Ø6.0	60
	12B60065	Ø6.0	65
	12B62030	Ø6.2	30
	12B62035	Ø6.2	35
	12B62040	Ø6.2	40
	12B62045	Ø6.2	45
	12B62050	Ø6.2	50
	12B62055	Ø6.2	55
	12B62060	Ø6.2	60
	12B62065	Ø6.2	65
	12B65030	Ø6.5	30
	12B65035	Ø6.5	35
	12B65040	Ø6.5	40
	12B65045	Ø6.5	45
	12B65050	Ø6.5	50
	12B65055	Ø6.5	55
	12B65060	Ø6.5	60
	12B65065	Ø6.5	65
	12B65070	Ø6.5	70
	12B65075	Ø6.5	75
	12B65080	Ø6.5	80
	12B65085	Ø6.5	85
	12B65090	Ø6.5	90
	12B65095	Ø6.5	95
	12B65100	Ø6.5	100
	12B70030	Ø7.0	30
	12B70035	Ø7.0	35
	12B70040	Ø7.0	40
	12B70045	Ø7.0	45
	12B70050	Ø7.0	50
	12B70055	Ø7.0	55
	12B70060	Ø7.0	60
	12B70065	Ø7.0	65
	12B70070	Ø7.0	70
	12B70075	Ø7.0	75
	12B70080	Ø7.0	80

12B70085	Ø7.0	85
12B70090	Ø7.0	90
12B70095	Ø7.0	95
12B70100	Ø7.0	100
12B75030	Ø7.5	30
12B75035	Ø7.5	35
12B75040	Ø7.5	40
12B75045	Ø7.5	45
12B75050	Ø7.5	50
12B75055	Ø7.5	55
12B75060	Ø7.5	60
12B75065	Ø7.5	65
12B75070	Ø7.5	70
12B75075	Ø7.5	75
12B75080	Ø7.5	80
12B75085	Ø7.5	85
12B75090	Ø7.5	90
12B75095	Ø7.5	95
12B75100	Ø7.5	100
12B80030	Ø8.0	30
12B80035	Ø8.0	35
12B80040	Ø8.0	40
12B80045	Ø8.0	45
12B80050	Ø8.0	50
12B80055	Ø8.0	55
12B80060	Ø8.0	60
12B80065	Ø8.0	65
12B80070	Ø8.0	70
12B80075	Ø8.0	75
12B80080	Ø8.0	80
12B80085	Ø8.0	85
12B80090	Ø8.0	90
12B80095	Ø8.0	95
12B80100	Ø8.0	100
12B80110	Ø8.0	110
12B80120	Ø8.0	120
12B80130	Ø8.0	130
12B85030	Ø8.5	30
12B85035	Ø8.5	35
12B85040	Ø8.5	40
12B85045	Ø8.5	45
12B85050	Ø8.5	50
12B85055	Ø8.5	55
12B85060	Ø8.5	60
12B85065	Ø8.5	65
12B85070	Ø8.5	70
12B85075	Ø8.5	75
12B85080	Ø8.5	80
12B85085	Ø8.5	85
12B85090	Ø8.5	90
12B85095	Ø8.5	95
12B85100	Ø8.5	100
12B85110	Ø8.5	110
12B85120	Ø8.5	120
12B85130	Ø8.5	130

福
利
縫
章
製
造
有
限
公
司


7. 03

多軸向中空長杯骨鬆釘(Poly-axial Cannulated Reduction Bone Cement Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	12C45030	Ø4.5	30
	12C45035	Ø4.5	35
	12C45040	Ø4.5	40
	12C45045	Ø4.5	45
	12C50030	Ø5.0	30
	12C50035	Ø5.0	35
	12C50040	Ø5.0	40
	12C50045	Ø5.0	45
	12C50050	Ø5.0	50
	12C55030	Ø5.5	30
	12C55035	Ø5.5	35
	12C55040	Ø5.5	40
	12C55045	Ø5.5	45
	12C55050	Ø5.5	50
	12C60030	Ø6.0	30
	12C60035	Ø6.0	35
	12C60040	Ø6.0	40
	12C60045	Ø6.0	45
	12C60050	Ø6.0	50
	12C60055	Ø6.0	55
	12C60060	Ø6.0	60
	12C60065	Ø6.0	65
	12C62030	Ø6.2	30
	12C62035	Ø6.2	35
	12C62040	Ø6.2	40
	12C62045	Ø6.2	45
	12C62050	Ø6.2	50
	12C62055	Ø6.2	55
	12C62060	Ø6.2	60
	12C62065	Ø6.2	65
	12C65030	Ø6.5	30
	12C65035	Ø6.5	35
	12C65040	Ø6.5	40
	12C65045	Ø6.5	45
	12C65050	Ø6.5	50
	12C65055	Ø6.5	55
	12C65060	Ø6.5	60
	12C65065	Ø6.5	65
	12C65070	Ø6.5	70
	12C65075	Ø6.5	75
	12C65080	Ø6.5	80
	12C65085	Ø6.5	85
	12C65090	Ø6.5	90
	12C65095	Ø6.5	95
	12C65100	Ø6.5	100
	12C70030	Ø7.0	30
	12C70035	Ø7.0	35
	12C70040	Ø7.0	40
	12C70045	Ø7.0	45
	12C70050	Ø7.0	50
	12C70055	Ø7.0	55
	12C70060	Ø7.0	60
	12C70065	Ø7.0	65
	12C70070	Ø7.0	70
	12C70075	Ø7.0	75
	12C70080	Ø7.0	80

12C70085	Ø7.0	85
12C70090	Ø7.0	90
12C70095	Ø7.0	95
12C70100	Ø7.0	100
12C75030	Ø7.5	30
12C75035	Ø7.5	35
12C75040	Ø7.5	40
12C75045	Ø7.5	45
12C75050	Ø7.5	50
12C75055	Ø7.5	55
12C75060	Ø7.5	60
12C75065	Ø7.5	65
12C75070	Ø7.5	70
12C75075	Ø7.5	75
12C75080	Ø7.5	80
12C75085	Ø7.5	85
12C75090	Ø7.5	90
12C75095	Ø7.5	95
12C75100	Ø7.5	100
12C80030	Ø8.0	30
12C80035	Ø8.0	35
12C80040	Ø8.0	40
12C80045	Ø8.0	45
12C80050	Ø8.0	50
12C80055	Ø8.0	55
12C80060	Ø8.0	60
12C80065	Ø8.0	65
12C80070	Ø8.0	70
12C80075	Ø8.0	75
12C80080	Ø8.0	80
12C80085	Ø8.0	85
12C80090	Ø8.0	90
12C80095	Ø8.0	95
12C80100	Ø8.0	100
12C80110	Ø8.0	110
12C80120	Ø8.0	120
12C80130	Ø8.0	130
12C85030	Ø8.5	30
12C85035	Ø8.5	35
12C85040	Ø8.5	40
12C85045	Ø8.5	45
12C85050	Ø8.5	50
12C85055	Ø8.5	55
12C85060	Ø8.5	60
12C85065	Ø8.5	65
12C85070	Ø8.5	70
12C85075	Ø8.5	75
12C85080	Ø8.5	80
12C85085	Ø8.5	85
12C85090	Ø8.5	90
12C85095	Ø8.5	95
12C85100	Ø8.5	100
12C85110	Ø8.5	110
12C85120	Ø8.5	120
12C85130	Ø8.5	130

連接桿(Rod)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	10A55040	Ø5.5	40
	10A55050	Ø5.5	50
	10A55060	Ø5.5	60
	10A55070	Ø5.5	70
	10A55080	Ø5.5	80
	10A55090	Ø5.5	90
	10A55100	Ø5.5	100
	10A55110	Ø5.5	110
	10A55120	Ø5.5	120
	10A55130	Ø5.5	130
	10A55140	Ø5.5	140
	10A55150	Ø5.5	150
	10A55160	Ø5.5	160
	10A55170	Ø5.5	170
	10A55180	Ø5.5	180
	10A55190	Ø5.5	190
	10A55200	Ø5.5	200
	10A55210	Ø5.5	210
	10A55220	Ø5.5	220
	10A55230	Ø5.5	230
	10A55240	Ø5.5	240
	10A55250	Ø5.5	250
	10A55300	Ø5.5	300
	10A55350	Ø5.5	350
	10A55400	Ø5.5	400
	10A55450	Ø5.5	450
	10A55500	Ø5.5	500
	10A55550	Ø5.5	550
	10A55600	Ø5.5	600

連接桿(Rod)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	10I55040	Ø5.5	40
	10I55050	Ø5.5	50
	10I55060	Ø5.5	60
	10I55070	Ø5.5	70
	10I55080	Ø5.5	80
	10I55090	Ø5.5	90
	10I55100	Ø5.5	100
	10I55110	Ø5.5	110
	10I55120	Ø5.5	120
	10I55130	Ø5.5	130
	10I55140	Ø5.5	140
	10I55150	Ø5.5	150
	10I55160	Ø5.5	160
	10I55170	Ø5.5	170
	10I55180	Ø5.5	180
	10I55190	Ø5.5	190
	10I55200	Ø5.5	200
	10I55210	Ø5.5	210
	10I55220	Ø5.5	220
	10I55230	Ø5.5	230
	10I55240	Ø5.5	240
	10I55250	Ø5.5	250
	10I55300	Ø5.5	300
	10I55350	Ø5.5	350
	10I55400	Ø5.5	400
	10I55450	Ø5.5	450
	10I55500	Ø5.5	500
	10I55550	Ø5.5	550
	10I55600	Ø5.5	600

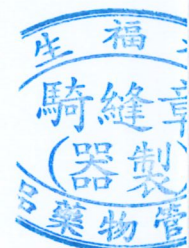

鎖固螺絲(Set Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長(mm)
	10C90045	Ø9.0	4.5
	10C00045	Ø10.0	4.5

軸型連接塊(Axial Connector)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長(mm)
	15B57014	Ø5.7	14

板型連接塊(Domino Connector)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長(mm)
	15C57014	Ø5.7	14

橫向連接器(Transverse Link) (搭配 Ø 5.5mm 連接桿)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長(mm)
	15D55050	Ø5.6	50
	15D55060	Ø5.6	60
	15D55070	Ø5.6	70
	15D55080	Ø5.6	80

橫向連接器(Transverse Link) (搭配 Ø 5.5mm 連接桿)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長(mm)
	15H55050	Ø5.6	50
	15H55060	Ø5.6	60
	15H55070	Ø5.6	70
	15H55080	Ø5.6	80

骨釘杯頭顏色	直徑(mm)	骨釘杯頭顏色	直徑(mm)
金黃	Ø4.5	銀色	Ø6.5
淡綠	Ø5.0	古銅	Ø7.0
淡藍	Ø5.5	青色	Ø7.5
青綠	Ø6.0	洋紅	Ø8.0
黃綠	Ø6.2	紫紅	Ø8.5

萬向連接器(Universal Link) (搭配 Ø 5.5mm 連接桿)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長(mm)
	15E55040	Ø5.7	40-60
	15E55060	Ø5.7	60-90


側桿(Side Rod)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長(mm)
	15A55020	Ø5.5	20
	15A55025	Ø5.5	25
	15A55030	Ø5.5	30
	15A55035	Ø5.5	35

椎板鉤(Lamina Hook)			
示意圖	型號	寬(mm)	長(mm)
	15F05005	5	5
	15F05007	5	7
	15F05009	5	9
	15F05011	5	11
	15F07005	7	5
	15F07007	7	7
	15F07009	7	9
	15F07011	7	11


椎弓鉤(Pedicle Hook)			
示意圖	型號	寬(mm)	長(mm)
	15G09007	9	7
	15G09008	9	8
	15G09009	9	9

多軸向骨釘	多軸向骨釘 (無陽極處理)	多軸向中空骨釘
型號	型號	型號
11A65050	11D65050	11B65050
		
多軸向中空骨鬆釘	多軸向長杯骨釘	多軸向長杯中空骨釘
型號	型號	型號
11C65050	12A65050	12B65050
		
多軸向中空長杯骨鬆釘	連接桿	連接桿
型號	型號	型號
12C65050	10A55050	10I55050
		

鎖固螺絲	軸型連接塊	板型連接塊
型號	型號	型號
10C90045	15B57014	15C57014
		
橫向連接器	橫向連接器	萬象連接器
型號	型號	型號
15D55050	15H55050	15E55040
		
側桿	椎板鉤	椎弓鉤-內含六角螺絲
型號	型號	型號
15A55030	15F05011	15G09008
		

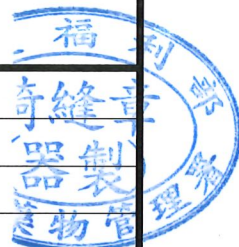

2. 7. 03

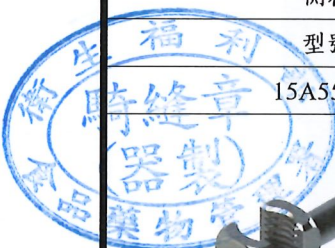

112 7. 03