



“益脊微”椎弓螺釘系統
“EZ ENDO” Pedicle Screw Spinal System

衛部醫器製字第 008346 號

使用前務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

■ 產品敘述

本產品為一套用於脊椎手術之固定系統，是由連接桿(Rod)、椎弓根螺釘(Pedicle Screw)以及鎖固螺絲(Set Screw)等組件構成。本產品具有各種不同尺寸可選用，以符合不同患者之需求。其中骨鬆釘系列適用於骨質疏鬆患者。所有組件皆為符合 ASTM F136 與 ISO5832-3 規範之鈦六鋁四鈮合金(Ti-6Al-4V)所製成。

■ 適應症

A. 本產品用於固定非頸椎的脊柱，本產品的多軸向 ENDO 中空長翼骨鬆骨釘，適用於下列適應症：

1. 退化性椎間盤疾病(定義為起源於椎間盤之疼痛，且經由病史與放射線攝影檢查確認椎間盤退化)。
2. 脊椎滑脫。
3. 壓迫性骨折。
4. 脊椎病變呈不穩定。
5. 腫瘤。
6. 椎孔狹窄。
7. 假關節。
8. 脊柱畸形(如脊椎側彎、脊柱後凸畸形和、或前凸)
9. 骨質疏鬆(建議骨鬆釘系列搭配骨水泥使用)。

B. 本產品用於固定非頸椎的脊柱，本產品的多軸向 ENDO 中空長翼骨釘，適用於下列適應症：

1. 退化性椎間盤疾病(定義為起源於椎間盤之疼痛，且經由病史與放射線攝影檢查確認椎間盤退化)。
2. 脊椎滑脫。
3. 壓迫性骨折。
4. 脊椎病變呈不穩定。
5. 腫瘤。
6. 椎孔狹窄。
7. 假關節。
8. 脊柱畸形(如脊椎側彎、脊柱後凸畸形和、或前凸)

■ 禁忌症

本產品並非涵蓋所有狀況，下列禁忌症將由醫師視部分或全部考量因素決定是否進行手術：

1. 創傷或病灶之椎體有感染之症狀。
2. 骨頭發育不完全或骨質異常，不能確保脊椎釘之固定。
3. 開放性創傷。
4. 對植入物材質有過敏者。

■ 副作用與併發症

醫師手術前，應將下列可能發生的不良反應告知病患。

- A. 硬脊膜破裂。
- B. 感染。
- C. 植入物彎曲或斷裂。
- D. 對植入物材質引起過敏反應。
- E. 因手術創傷，造成神經損傷。
- F. 植入物之抗力作用，導致骨密度降低。
- G. 早期植入物鬆脫
- H. 術後脊椎變形
- I. 神經受損
- J. 出血
- K. 影響日常生活行動
- L. 不融合或延遲融合
- M. 死亡
- N. 癱瘓

■ 滅菌方式

本產品為非滅菌產品，使用前須拆除包裝袋，經高溫高壓滅菌後，方可使用。滅菌不完全可能導致感染。滅菌條件如下：

滅菌參數	蒸氣循環	滅菌溫度	滅菌時間	乾燥時間
1	重力式	121℃	30min	30min
2	真空式	132℃	4min	30min

■ 儲存與管理

- A. 植入物應儲存於乾燥環境。
- B. 直到使用前，不能移除任何保護套或保護設備。
- C. 植入物應小心運送保管，避免刮傷及損壞產品。

■ 警告與注意事項

- A. 本產品須由受過專業教育訓練的專科醫師操作使用。
- B. 選擇適當手術工具進行植入，有助於手術順利進行。
- C. 植入適當的植入物尺寸，有助於穩固內固定器的穩定性，因此，正確選擇適當的植入物尺寸，可將危險性降至最小。
- D. 金屬材質的內固定器無法與正常且健康的骨骼具有相同的抗力，因此，無法預判植入物在無輔助支撐的狀況下，負荷身體重量時，何時毀壞。
- E. 如延遲癒合或不癒合，植入物可能因金屬疲乏而斷裂。骨癒合的程度、負荷、活動量與方式，都會影響植入物壽命。
- F. 手術時造成植入物上的刮痕與磨損等，皆可能造成金屬疲乏的提前發生。
- G. 混合不同材質的金屬植入物，可能導致金屬腐蝕，如鈦金屬螺絲與不鏽鋼骨板相結合，故使用內固定系統時應使用相同材質。
- H. 手術過程中應使用 X-Ray 輔助定位及復位，以減少併發症。

- I. 植入物絕不可重複使用，已使用過的植入物，於移除後應遵循當地法規，以醫療廢棄物銷毀拋棄。
- J. 產品有缺件或刮傷損壞，請勿使用。
- K. 在臨床使用前，手術醫師須充分了解該手術之各個層面，及脊椎後路固定系統之限制。本產品宜由熟悉術前/後處置、手術技術、注意事項及此類手術可能風險的醫師施行。醫師對於手術技術、適宜的復位、植入物的選擇與安裝、術前/後的病患照護處置等知識是否充分，被視為手術療效成功與否之基本要素。
- L. 植入物可能因負荷過重而塌陷進而導致延遲癒合或不癒合，因此在骨癒合正常發生前，植入物必須以分擔負重方式承受負荷。
- M. 植入物須妥善保護，防止其與其他金屬或粗糙物體接觸而產生之損傷、刮痕、凹陷，上述變化會在表面曾造成瑕疵及內部應力變化，而成為植入物斷裂之集中處。
- N. 脊椎後方固定系統包含固定桿、螺釘等植入物及一套特殊之配合器械組。除另有提示，不得使用其他器械，以免因兩者匹配性不良導致非預期之後果。
- O. 如病患之職業或活動會對植入物招致過度應力，可能會導致植入物的失敗。
- P. 在某些案例中，退化性疾病之發展有可能過於迅速，以致減低植入物之預期使用壽命。骨科器材或植入物僅能視為一項延遲技術或提供暫時性舒緩的裝置。
- Q. 病患應當被充分告知植入物的限制，包含/不僅限於病患體重或活動之過度負荷所產生的衝擊，並須被教導合宜控制自身活動。病患應當清楚了解金屬植入物不如正常、健康的骨骼一般強壯，如過度負荷將導致植入物彎曲、變形、鬆脫或斷裂。病患如因活躍、虛弱或心智失常，以致無法使用重量支撐裝置，可能會在術後復健期間承受較大的失敗風險。
- R. 拔除未鬆脫的脊椎螺釘可能需要使用特殊器械破壞植入物表面介面，此項技術應於尚未臨床施行前先行體外實驗模擬操練之。
- S. 醫師於決定拔除植入物前，應將病患需再接受另一次手術之風險及拔除困難等因素列入考慮。
- T. 植入物拔除後需妥善照護，以防止骨折發生。
- U. 使用多軸向 ENDO 中空長翼骨鬆骨釘時，應搭配填充物(骨水泥) 一併使用。

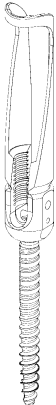
製造業者名稱：尚品醫療器材股份有限公司

製造業者地址：新北市中和區立德街 170 號 7 樓

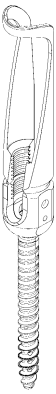
醫療器材商名稱：尚品醫療器材股份有限公司

醫療器材商地址：「依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載」(市售品須刊載實際地址)

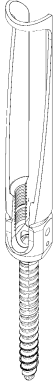
■ 型號及規格

7 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨釘 7 cm Poly-axial ENDO Cannulated Long Arm Pedicle Screw			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	18B45030	Ø4.5	30
	18B45035	Ø4.5	35
	18B45040	Ø4.5	40
	18B45045	Ø4.5	45
	18B50030	Ø5.0	30
	18B50035	Ø5.0	35
	18B50040	Ø5.0	40
	18B50045	Ø5.0	45
	18B50050	Ø5.0	50
	18B55030	Ø5.5	30
	18B55035	Ø5.5	35
	18B55040	Ø5.5	40
	18B55045	Ø5.5	45
	18B55050	Ø5.5	50
	18B60030	Ø6.0	30
	18B60035	Ø6.0	35
	18B60040	Ø6.0	40
	18B60045	Ø6.0	45
	18B60050	Ø6.0	50
	18B60055	Ø6.0	55
	18B60060	Ø6.0	60
	18B60065	Ø6.0	65
	18B62030	Ø6.2	30
	18B62035	Ø6.2	35
	18B62040	Ø6.2	40
	18B62045	Ø6.2	45
	18B62050	Ø6.2	50
	18B62055	Ø6.2	55
	18B62060	Ø6.2	60
	18B62065	Ø6.2	65
	18B65030	Ø6.5	30
	18B65035	Ø6.5	35
	18B65040	Ø6.5	40
	18B65045	Ø6.5	45
	18B65050	Ø6.5	50
	18B65055	Ø6.5	55
	18B65060	Ø6.5	60
	18B65065	Ø6.5	65
	18B65070	Ø6.5	70
	18B65075	Ø6.5	75
	18B65080	Ø6.5	80
	18B65085	Ø6.5	85
	18B65090	Ø6.5	90
	18B65095	Ø6.5	95
	18B65100	Ø6.5	100
	18B70030	Ø7.0	30
	18B70035	Ø7.0	35
	18B70040	Ø7.0	40
	18B70045	Ø7.0	45
	18B70050	Ø7.0	50
	18B70055	Ø7.0	55
	18B70060	Ø7.0	60
	18B70065	Ø7.0	65
	18B70070	Ø7.0	70

18B70075	Ø7.0	75
18B70080	Ø7.0	80
18B70085	Ø7.0	85
18B70090	Ø7.0	90
18B70095	Ø7.0	95
18B70100	Ø7.0	100
18B75030	Ø7.5	30
18B75035	Ø7.5	35
18B75040	Ø7.5	40
18B75045	Ø7.5	45
18B75050	Ø7.5	50
18B75055	Ø7.5	55
18B75060	Ø7.5	60
18B75065	Ø7.5	65
18B75070	Ø7.5	70
18B75075	Ø7.5	75
18B75080	Ø7.5	80
18B75085	Ø7.5	85
18B75090	Ø7.5	90
18B75095	Ø7.5	95
18B75100	Ø7.5	100
18B80030	Ø8.0	30
18B80035	Ø8.0	35
18B80040	Ø8.0	40
18B80045	Ø8.0	45
18B80050	Ø8.0	50
18B80055	Ø8.0	55
18B80060	Ø8.0	60
18B80065	Ø8.0	65
18B80070	Ø8.0	70
18B80075	Ø8.0	75
18B80080	Ø8.0	80
18B80085	Ø8.0	85
18B80090	Ø8.0	90
18B80095	Ø8.0	95
18B80100	Ø8.0	100
18B85030	Ø8.5	30
18B85035	Ø8.5	35
18B85040	Ø8.5	40
18B85045	Ø8.5	45
18B85050	Ø8.5	50
18B85055	Ø8.5	55
18B85060	Ø8.5	60
18B85065	Ø8.5	65
18B85070	Ø8.5	70
18B85075	Ø8.5	75
18B85080	Ø8.5	80
18B85085	Ø8.5	85
18B85090	Ø8.5	90
18B85095	Ø8.5	95
18B85100	Ø8.5	100

7 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨鬆骨釘 7 cm Poly-axial ENDO Fenestrated Long Arm Pedicle Screw			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	18C45030	Ø4.5	30
	18C45035	Ø4.5	35
	18C45040	Ø4.5	40
	18C45045	Ø4.5	45
	18C50030	Ø5.0	30
	18C50035	Ø5.0	35
	18C50040	Ø5.0	40
	18C50045	Ø5.0	45
	18C50050	Ø5.0	50
	18C55030	Ø5.5	30
	18C55035	Ø5.5	35
	18C55040	Ø5.5	40
	18C55045	Ø5.5	45
	18C55050	Ø5.5	50
	18C60030	Ø6.0	30
	18C60035	Ø6.0	35
	18C60040	Ø6.0	40
	18C60045	Ø6.0	45
	18C60050	Ø6.0	50
	18C60055	Ø6.0	55
	18C60060	Ø6.0	60
	18C60065	Ø6.0	65
	18C62030	Ø6.2	30
	18C62035	Ø6.2	35
	18C62040	Ø6.2	40
	18C62045	Ø6.2	45
	18C62050	Ø6.2	50
	18C62055	Ø6.2	55
	18C62060	Ø6.2	60
	18C62065	Ø6.2	65
	18C65030	Ø6.5	30
	18C65035	Ø6.5	35
	18C65040	Ø6.5	40
	18C65045	Ø6.5	45
	18C65050	Ø6.5	50
	18C65055	Ø6.5	55
	18C65060	Ø6.5	60
	18C65065	Ø6.5	65
	18C65070	Ø6.5	70
	18C65075	Ø6.5	75
	18C65080	Ø6.5	80
	18C65085	Ø6.5	85
	18C65090	Ø6.5	90
	18C65095	Ø6.5	95
	18C65100	Ø6.5	100
	18C70030	Ø7.0	30
	18C70035	Ø7.0	35
	18C70040	Ø7.0	40
	18C70045	Ø7.0	45
	18C70050	Ø7.0	50
	18C70055	Ø7.0	55
	18C70060	Ø7.0	60
	18C70065	Ø7.0	65
	18C70070	Ø7.0	70
	18C70075	Ø7.0	75
	18C70080	Ø7.0	80
	18C70085	Ø7.0	85
	18C70090	Ø7.0	90

18C70095	Ø7.0	95
18C70100	Ø7.0	100
18C75030	Ø7.5	30
18C75035	Ø7.5	35
18C75040	Ø7.5	40
18C75045	Ø7.5	45
18C75050	Ø7.5	50
18C75055	Ø7.5	55
18C75060	Ø7.5	60
18C75065	Ø7.5	65
18C75070	Ø7.5	70
18C75075	Ø7.5	75
18C75080	Ø7.5	80
18C75085	Ø7.5	85
18C75090	Ø7.5	90
18C75095	Ø7.5	95
18C75100	Ø7.5	100
18C80030	Ø8.0	30
18C80035	Ø8.0	35
18C80040	Ø8.0	40
18C80045	Ø8.0	45
18C80050	Ø8.0	50
18C80055	Ø8.0	55
18C80060	Ø8.0	60
18C80065	Ø8.0	65
18C80070	Ø8.0	70
18C80075	Ø8.0	75
18C80080	Ø8.0	80
18C80085	Ø8.0	85
18C80090	Ø8.0	90
18C80095	Ø8.0	95
18C80100	Ø8.0	100
18C85030	Ø8.5	30
18C85035	Ø8.5	35
18C85040	Ø8.5	40
18C85045	Ø8.5	45
18C85050	Ø8.5	50
18C85055	Ø8.5	55
18C85060	Ø8.5	60
18C85065	Ø8.5	65
18C85070	Ø8.5	70
18C85075	Ø8.5	75
18C85080	Ø8.5	80
18C85085	Ø8.5	85
18C85090	Ø8.5	90
18C85095	Ø8.5	95
18C85100	Ø8.5	100

10 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨釘 10 cm Poly-axial ENDO Cannulated Long Arm Pedicle Screw			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	19B45030	Ø4.5	30
	19B45035	Ø4.5	35
	19B45040	Ø4.5	40
	19B45045	Ø4.5	45
	19B50030	Ø5.0	30
	19B50035	Ø5.0	35
	19B50040	Ø5.0	40
	19B50045	Ø5.0	45
	19B50050	Ø5.0	50
	19B55030	Ø5.5	30
	19B55035	Ø5.5	35
	19B55040	Ø5.5	40
	19B55045	Ø5.5	45
	19B55050	Ø5.5	50
	19B60030	Ø6.0	30
	19B60035	Ø6.0	35
	19B60040	Ø6.0	40
	19B60045	Ø6.0	45
	19B60050	Ø6.0	50
	19B60055	Ø6.0	55
	19B60060	Ø6.0	60
	19B60065	Ø6.0	65
	19B62030	Ø6.2	30
	19B62035	Ø6.2	35
	19B62040	Ø6.2	40
	19B62045	Ø6.2	45
	19B62050	Ø6.2	50
	19B62055	Ø6.2	55
	19B62060	Ø6.2	60
	19B62065	Ø6.2	65
	19B65030	Ø6.5	30
	19B65035	Ø6.5	35
	19B65040	Ø6.5	40
	19B65045	Ø6.5	45
	19B65050	Ø6.5	50
	19B65055	Ø6.5	55
	19B65060	Ø6.5	60
	19B65065	Ø6.5	65
	19B65070	Ø6.5	70
	19B65075	Ø6.5	75
	19B65080	Ø6.5	80
	19B65085	Ø6.5	85
	19B65090	Ø6.5	90
	19B65095	Ø6.5	95
	19B65100	Ø6.5	100
	19B70030	Ø7.0	30
	19B70035	Ø7.0	35
	19B70040	Ø7.0	40
	19B70045	Ø7.0	45
	19B70050	Ø7.0	50
	19B70055	Ø7.0	55
	19B70060	Ø7.0	60
	19B70065	Ø7.0	65
	19B70070	Ø7.0	70
	19B70075	Ø7.0	75
	19B70080	Ø7.0	80
	19B70085	Ø7.0	85

19B70090	Ø7.0	90
19B70095	Ø7.0	95
19B70100	Ø7.0	100
19B75030	Ø7.5	30
19B75035	Ø7.5	35
19B75040	Ø7.5	40
19B75045	Ø7.5	45
19B75050	Ø7.5	50
19B75055	Ø7.5	55
19B75060	Ø7.5	60
19B75065	Ø7.5	65
19B75070	Ø7.5	70
19B75075	Ø7.5	75
19B75080	Ø7.5	80
19B75085	Ø7.5	85
19B75090	Ø7.5	90
19B75095	Ø7.5	95
19B75100	Ø7.5	100
19B80030	Ø8.0	30
19B80035	Ø8.0	35
19B80040	Ø8.0	40
19B80045	Ø8.0	45
19B80050	Ø8.0	50
19B80055	Ø8.0	55
19B80060	Ø8.0	60
19B80065	Ø8.0	65
19B80070	Ø8.0	70
19B80075	Ø8.0	75
19B80080	Ø8.0	80
19B80085	Ø8.0	85
19B80090	Ø8.0	90
19B80095	Ø8.0	95
19B80100	Ø8.0	100
19B85030	Ø8.5	30
19B85035	Ø8.5	35
19B85040	Ø8.5	40
19B85045	Ø8.5	45
19B85050	Ø8.5	50
19B85055	Ø8.5	55
19B85060	Ø8.5	60
19B85065	Ø8.5	65
19B85070	Ø8.5	70
19B85075	Ø8.5	75
19B85080	Ø8.5	80
19B85085	Ø8.5	85
19B85090	Ø8.5	90
19B85095	Ø8.5	95
19B85100	Ø8.5	100

10 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨鬆骨釘 10 cm Poly-axial ENDO Fenestrated Long Arm Pedicule Screw			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	19C45030	Ø4.5	30
	19C45035	Ø4.5	35
	19C45040	Ø4.5	40
	19C45045	Ø4.5	45
	19C50030	Ø5.0	30
	19C50035	Ø5.0	35
	19C50040	Ø5.0	40
	19C50045	Ø5.0	45
	19C50050	Ø5.0	50
	19C55030	Ø5.5	30
	19C55035	Ø5.5	35
	19C55040	Ø5.5	40
	19C55045	Ø5.5	45
	19C55050	Ø5.5	50
	19C60030	Ø6.0	30
	19C60035	Ø6.0	35
	19C60040	Ø6.0	40
	19C60045	Ø6.0	45
	19C60050	Ø6.0	50
	19C60055	Ø6.0	55
	19C60060	Ø6.0	60
	19C60065	Ø6.0	65
	19C62030	Ø6.2	30
	19C62035	Ø6.2	35
	19C62040	Ø6.2	40
	19C62045	Ø6.2	45
	19C62050	Ø6.2	50
	19C62055	Ø6.2	55
	19C62060	Ø6.2	60
	19C62065	Ø6.2	65
	19C65030	Ø6.5	30
	19C65035	Ø6.5	35
	19C65040	Ø6.5	40
	19C65045	Ø6.5	45
	19C65050	Ø6.5	50
	19C65055	Ø6.5	55
	19C65060	Ø6.5	60
	19C65065	Ø6.5	65
	19C65070	Ø6.5	70
	19C65075	Ø6.5	75
	19C65080	Ø6.5	80
	19C65085	Ø6.5	85
	19C65090	Ø6.5	90
	19C65095	Ø6.5	95
	19C65100	Ø6.5	100
	19C70030	Ø7.0	30
	19C70035	Ø7.0	35
	19C70040	Ø7.0	40
	19C70045	Ø7.0	45
	19C70050	Ø7.0	50
	19C70055	Ø7.0	55
	19C70060	Ø7.0	60
	19C70065	Ø7.0	65
	19C70070	Ø7.0	70
	19C70075	Ø7.0	75
	19C70080	Ø7.0	80
	19C70085	Ø7.0	85
	19C70090	Ø7.0	90

19C70095	Ø7.0	95
19C70100	Ø7.0	100
19C75030	Ø7.5	30
19C75035	Ø7.5	35
19C75040	Ø7.5	40
19C75045	Ø7.5	45
19C75050	Ø7.5	50
19C75055	Ø7.5	55
19C75060	Ø7.5	60
19C75065	Ø7.5	65
19C75070	Ø7.5	70
19C75075	Ø7.5	75
19C75080	Ø7.5	80
19C75085	Ø7.5	85
19C75090	Ø7.5	90
19C75095	Ø7.5	95
19C75100	Ø7.5	100
19C80030	Ø8.0	30
19C80035	Ø8.0	35
19C80040	Ø8.0	40
19C80045	Ø8.0	45
19C80050	Ø8.0	50
19C80055	Ø8.0	55
19C80060	Ø8.0	60
19C80065	Ø8.0	65
19C80070	Ø8.0	70
19C80075	Ø8.0	75
19C80080	Ø8.0	80
19C80085	Ø8.0	85
19C80090	Ø8.0	90
19C80095	Ø8.0	95
19C80100	Ø8.0	100
19C85030	Ø8.5	30
19C85035	Ø8.5	35
19C85040	Ø8.5	40
19C85045	Ø8.5	45
19C85050	Ø8.5	50
19C85055	Ø8.5	55
19C85060	Ø8.5	60
19C85065	Ø8.5	65
19C85070	Ø8.5	70
19C85075	Ø8.5	75
19C85080	Ø8.5	80
19C85085	Ø8.5	85
19C85090	Ø8.5	90
19C85095	Ø8.5	95
19C85100	Ø8.5	100

預彎連接桿 (Pre-bend Rod)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	10B55040	Ø5.5	40
	10B55050	Ø5.5	50
	10B55060	Ø5.5	60
	10B55070	Ø5.5	70
	10B55080	Ø5.5	80
	10B55090	Ø5.5	90
	10B55100	Ø5.5	100
	10B55110	Ø5.5	110
	10B55120	Ø5.5	120
	10B55130	Ø5.5	130
	10B55140	Ø5.5	140
	10B55150	Ø5.5	150
	10B55160	Ø5.5	160
	10B55170	Ø5.5	170
	10B55180	Ø5.5	180
	10B55190	Ø5.5	190
	10B55200	Ø5.5	200
	10B55210	Ø5.5	210
	10B55220	Ø5.5	220
	10B55230	Ø5.5	230
	10B55240	Ø5.5	240
	10B55250	Ø5.5	250

直式 ENDO 連接桿 (Straight ENDO Rod)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	10F55040	Ø5.5	40
	10F55050	Ø5.5	50
	10F55060	Ø5.5	60
	10F55070	Ø5.5	70
	10F55080	Ø5.5	80
	10F55090	Ø5.5	90
	10F55100	Ø5.5	100
	10F55110	Ø5.5	110
	10F55120	Ø5.5	120
	10F55130	Ø5.5	130
	10F55140	Ø5.5	140
	10F55150	Ø5.5	150
	10F55160	Ø5.5	160
	10F55170	Ø5.5	170
	10F55180	Ø5.5	180
	10F55190	Ø5.5	190
	10F55200	Ø5.5	200
	10F55210	Ø5.5	210
	10F55220	Ø5.5	220
	10F55230	Ø5.5	230
	10F55240	Ø5.5	240
	10F55250	Ø5.5	250
	10F55300	Ø5.5	300
	10F55350	Ø5.5	350
	10F55400	Ø5.5	400
	10F55450	Ø5.5	450
	10F55500	Ø5.5	500
	10F55550	Ø5.5	550
	10F55600	Ø5.5	600

鎖固螺絲 (Set Screw)			
示意圖	型號	直徑(mm)	長度(mm)
	10C90045	Ø9.0	4.5

ENDO 長翼杯頭-陽極處理後	
對應骨釘直徑的陽極處理顏色對應表	
骨釘直徑	顏色 / 色號
Ø4.5	金黃 Golden Yellow#54
Ø5.0	淡綠 Aqua#42
Ø5.5	淡藍 Light Cyan#34
Ø6.0	青綠 Sea Green#88
Ø6.2	黃綠 Yellow Green#100
Ø6.5	銀色 Silver#3
Ø7.0	古銅 Brown#12
Ø7.5	青色 Cyan#26
Ø8.0	洋紅 Magenta#66
Ø8.5	紫紅 Purple#72

7 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨釘	7 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨鬆骨釘	10 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨釘
型號	型號	型號
18B65045	18C65045	19B65045
		
10 公分多軸向 ENDO 中空長翼骨鬆骨釘	預彎連接桿	鎖固螺絲
型號	型號	型號
19C65045	10B55050	10C90045
		
直式 ENDO 連接桿		
型號		
10F55100		
		