

鎧基高分子椎間融合器

KAGE PEEK Interbody Cage

衛部醫器製字第 006911 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品說明

鎧基高分子椎間融合器(以下簡稱為"本產品")為聚醚醚酮(PEEK)材質，可植入脊椎(L1-S1)兩椎體間，做為脊椎矯正。

適應症

- ◆ 椎間盤退變之脊椎手術
- ◆ 脊椎前凸與脊椎後彎之畸型相關的不穩定
- ◆ 脊椎腫瘤重建手術或轉移性惡性腫瘤相關的不穩定
- ◆ 脊柱脫位、脊椎狹窄、骨髓細胞相關或外傷引起的不穩定
- ◆ 前次脊椎手術失敗之相關的假關節不穩定

禁忌症

- ◆ 嚴重的骨質疏鬆症
- ◆ 創傷或病灶之椎體有正處於感染活動期
- ◆ 不適合麻醉者
- ◆ 懷孕
- ◆ 病患無法配合醫師囑咐

副作用或併發症

- ◆ 發炎
- ◆ 感染
- ◆ 早期植入物鬆脫
- ◆ 神經受損
- ◆ 延遲癒合或不癒合
- ◆ 對植入物材質過敏
- ◆ 術後脊椎變形。

警告及注意事項

- ◆ 骨科與神經外科醫師應對此植入物及技術手冊有充分之研究與訓練，方能確實了解此植入物的限制因素及病患之影響。
- ◆ 本產品為滅菌包裝，使用前應先檢查包裝是否完整，以確保產品沒有受到汙染。

◆ 此產品僅供單一病人使用，且不可以再重新滅菌供二次使用

型號與規格



型號	高度	寬度	長度	型號	高度	寬度	長度
LC00722	7	8	22	LC01126	11	10	26
LC00822	8	8	22	LC01226	12	10	26
LC00724	7	10	24	LC01326	13	10	26
LC00824	8	10	24	LC01426	14	10	26
LC00924	9	10	24	LC01526	15	10	26
LC01024	10	10	24	LC00728	7	10	28
LC01124	11	10	24	LC00828	8	10	28
LC01224	12	10	24	LC00928	9	10	28
LC01324	13	10	24	LC01028	10	10	28
LC01424	14	10	24	LC01128	11	10	28
LC01524	15	10	24	LC01228	12	10	28
LC00725	7	10	25	LC01328	13	10	28
LC00825	8	10	25	LC01428	14	10	28
LC00925	9	10	25	LC01528	15	10	28
LC01025	10	10	25	LC00730	7	10	30
LC01125	11	10	25	LC00830	8	10	30
LC01225	12	10	25	LC00930	9	10	30
LC01325	13	10	25	LC01030	10	10	30
LC01425	14	10	25	LC01130	11	10	30
LC01525	15	10	25	LC01230	12	10	30
LC00726	7	10	26	LC01330	13	10	30
LC00826	8	10	26	LC01430	14	10	30
LC00926	9	10	26	LC01530	15	10	30
LC01026	10	10	26				

(單位：mm)



型號	高度	寬度	長度	角度	型號	高度	寬度	長度	角度
LCT107122500	7	12	25	0	LCT107122502	7	12	25	2
LCT107122600	7	12	26	0	LCT107122602	7	12	26	2
LCT107122800	7	12	28	0	LCT107122802	7	12	28	2
LCT107123000	7	12	30	0	LCT107123002	7	12	30	2
LCT107123200	7	12	32	0	LCT107123202	7	12	32	2
LCT107123300	7	12	33	0	LCT107123302	7	12	33	2
LCT108122500	8	12	25	0	LCT108122502	8	12	25	2
LCT108122600	8	12	26	0	LCT108122602	8	12	26	2
LCT108122800	8	12	28	0	LCT108122802	8	12	28	2
LCT108123000	8	12	30	0	LCT108123002	8	12	30	2
LCT108123200	8	12	32	0	LCT108123202	8	12	32	2
LCT108123300	8	12	33	0	LCT108123302	8	12	33	2
LCT109122500	9	12	25	0	LCT109122502	9	12	25	2
LCT109122600	9	12	26	0	LCT109122602	9	12	26	2
LCT109122800	9	12	28	0	LCT109122802	9	12	28	2
LCT109123000	9	12	30	0	LCT109123002	9	12	30	2
LCT109123200	9	12	32	0	LCT109123202	9	12	32	2
LCT109123300	9	12	33	0	LCT109123302	9	12	33	2
LCT110122500	10	12	25	0	LCT110122502	10	12	25	2
LCT110122600	10	12	26	0	LCT110122602	10	12	26	2
LCT110122800	10	12	28	0	LCT110122802	10	12	28	2
LCT110123000	10	12	30	0	LCT110123002	10	12	30	2
LCT110123200	10	12	32	0	LCT110123202	10	12	32	2
LCT110123300	10	12	33	0	LCT110123302	10	12	33	2
LCT111122500	11	12	25	0	LCT111122502	11	12	25	2
LCT111122600	11	12	26	0	LCT111122602	11	12	26	2
LCT111122800	11	12	28	0	LCT111122802	11	12	28	2
LCT111123000	11	12	30	0	LCT111123002	11	12	30	2
LCT111123200	11	12	32	0	LCT111123202	11	12	32	2
LCT111123300	11	12	33	0	LCT111123302	11	12	33	2
LCT112122500	12	12	25	0	LCT112122502	12	12	25	2
LCT112122600	12	12	26	0	LCT112122602	12	12	26	2
LCT112122800	12	12	28	0	LCT112122802	12	12	28	2

型號	高度	寬度	長度	角度	型號	高度	寬度	長度	角度
LCT112123000	12	12	30	0	LCT112123002	12	12	30	2
LCT112123200	12	12	32	0	LCT112123202	12	12	32	2
LCT112123300	12	12	33	0	LCT112123302	12	12	33	2
LCT113122500	13	12	25	0	LCT113122502	13	12	25	2
LCT113122600	13	12	26	0	LCT113122602	13	12	26	2
LCT113122800	13	12	28	0	LCT113122802	13	12	28	2
LCT113123000	13	12	30	0	LCT113123002	13	12	30	2
LCT113123200	13	12	32	0	LCT113123202	13	12	32	2
LCT113123300	13	12	33	0	LCT113123302	13	12	33	2
LCT114122500	14	12	25	0	LCT114122502	14	12	25	2
LCT114122600	14	12	26	0	LCT114122602	14	12	26	2
LCT114122800	14	12	28	0	LCT114122802	14	12	28	2
LCT114123000	14	12	30	0	LCT114123002	14	12	30	2
LCT114123200	14	12	32	0	LCT114123202	14	12	32	2
LCT114123300	14	12	33	0	LCT114123302	14	12	33	2
LCT115122500	15	12	25	0	LCT115122502	15	12	25	2
LCT115122600	15	12	26	0	LCT115122602	15	12	26	2
LCT115122800	15	12	28	0	LCT115122802	15	12	28	2
LCT115123000	15	12	30	0	LCT115123002	15	12	30	2
LCT115123200	15	12	32	0	LCT115123202	15	12	32	2
LCT115123300	15	12	33	0	LCT115123302	15	12	33	2
LCT107122504	7	12	25	4	LCT107122506	7	12	25	6
LCT107122604	7	12	26	4	LCT107122606	7	12	26	6
LCT107122804	7	12	28	4	LCT107122806	7	12	28	6
LCT107123004	7	12	30	4	LCT107123006	7	12	30	6
LCT107123204	7	12	32	4	LCT107123206	7	12	32	6
LCT107123304	7	12	33	4	LCT107123306	7	12	33	6
LCT108122504	8	12	25	4	LCT108122506	8	12	25	6
LCT108122604	8	12	26	4	LCT108122606	8	12	26	6
LCT108122804	8	12	28	4	LCT108122806	8	12	28	6
LCT108123004	8	12	30	4	LCT108123006	8	12	30	6
LCT108123204	8	12	32	4	LCT108123206	8	12	32	6
LCT108123304	8	12	33	4	LCT108123306	8	12	33	6
LCT109122504	9	12	25	4	LCT109122506	9	12	25	6
LCT109122604	9	12	26	4	LCT109122606	9	12	26	6
LCT109122804	9	12	28	4	LCT109122806	9	12	28	6
LCT109123004	9	12	30	4	LCT109123006	9	12	30	6
LCT109123204	9	12	32	4	LCT109123206	9	12	32	6

型號	高度	寬度	長度	角度	型號	高度	寬度	長度	角度
LCT109123304	9	12	33	4	LCT109123306	9	12	33	6
LCT110122504	10	12	25	4	LCT110122506	10	12	25	6
LCT110122604	10	12	26	4	LCT110122606	10	12	26	6
LCT110122804	10	12	28	4	LCT110122806	10	12	28	6
LCT110123004	10	12	30	4	LCT110123006	10	12	30	6
LCT110123204	10	12	32	4	LCT110123206	10	12	32	6
LCT110123304	10	12	33	4	LCT110123306	10	12	33	6
LCT111122504	11	12	25	4	LCT111122506	11	12	25	6
LCT111122604	11	12	26	4	LCT111122606	11	12	26	6
LCT111122804	11	12	28	4	LCT111122806	11	12	28	6
LCT111123004	11	12	30	4	LCT111123006	11	12	30	6
LCT111123204	11	12	32	4	LCT111123206	11	12	32	6
LCT111123304	11	12	33	4	LCT111123306	11	12	33	6
LCT112122504	12	12	25	4	LCT112122506	12	12	25	6
LCT112122604	12	12	26	4	LCT112122606	12	12	26	6
LCT112122804	12	12	28	4	LCT112122806	12	12	28	6
LCT112123004	12	12	30	4	LCT112123006	12	12	30	6
LCT112123204	12	12	32	4	LCT112123206	12	12	32	6
LCT112123304	12	12	33	4	LCT112123306	12	12	33	6
LCT113122504	13	12	25	4	LCT113122506	13	12	25	6
LCT113122604	13	12	26	4	LCT113122606	13	12	26	6
LCT113122804	13	12	28	4	LCT113122806	13	12	28	6
LCT113123004	13	12	30	4	LCT113123006	13	12	30	6
LCT113123204	13	12	32	4	LCT113123206	13	12	32	6
LCT113123304	13	12	33	4	LCT113123306	13	12	33	6
LCT114122504	14	12	25	4	LCT114122506	14	12	25	6
LCT114122604	14	12	26	4	LCT114122606	14	12	26	6
LCT114122804	14	12	28	4	LCT114122806	14	12	28	6
LCT114123004	14	12	30	4	LCT114123006	14	12	30	6
LCT114123204	14	12	32	4	LCT114123206	14	12	32	6
LCT114123304	14	12	33	4	LCT114123306	14	12	33	6
LCT115122504	15	12	25	4	LCT115122506	15	12	25	6
LCT115122604	15	12	26	4	LCT115122606	15	12	26	6
LCT115122804	15	12	28	4	LCT115122806	15	12	28	6
LCT115123004	15	12	30	4	LCT115123006	15	12	30	6
LCT115123204	15	12	32	4	LCT115123206	15	12	32	6
LCT115123304	15	12	33	4	LCT115123306	15	12	33	6
LCT107122508	7	12	25	8	LCT111123008	11	12	30	8

型號	高度	寬度	長度	角度	型號	高度	寬度	長度	角度
LCT107122608	7	12	26	8	LCT111123208	11	12	32	8
LCT107122808	7	12	28	8	LCT111123308	11	12	33	8
LCT107123008	7	12	30	8	LCT112122508	12	12	25	8
LCT107123208	7	12	32	8	LCT112122608	12	12	26	8
LCT107123308	7	12	33	8	LCT112122808	12	12	28	8
LCT108122508	8	12	25	8	LCT112123008	12	12	30	8
LCT108122608	8	12	26	8	LCT112123208	12	12	32	8
LCT108122808	8	12	28	8	LCT112123308	12	12	33	8
LCT108123008	8	12	30	8	LCT113122508	13	12	25	8
LCT108123208	8	12	32	8	LCT113122608	13	12	26	8
LCT108123308	8	12	33	8	LCT113122808	13	12	28	8
LCT109122508	9	12	25	8	LCT113123008	13	12	30	8
LCT109122608	9	12	26	8	LCT113123208	13	12	32	8
LCT109122808	9	12	28	8	LCT113123308	13	12	33	8
LCT109123008	9	12	30	8	LCT114122508	14	12	25	8
LCT109123208	9	12	32	8	LCT114122608	14	12	26	8
LCT109123308	9	12	33	8	LCT114122808	14	12	28	8
LCT110122508	10	12	25	8	LCT114123008	14	12	30	8
LCT110122608	10	12	26	8	LCT114123208	14	12	32	8
LCT110122808	10	12	28	8	LCT114123308	14	12	33	8
LCT110123008	10	12	30	8	LCT115122508	15	12	25	8
LCT110123208	10	12	32	8	LCT115122608	15	12	26	8
LCT110123308	10	12	33	8	LCT115122808	15	12	28	8
LCT111122508	11	12	25	8	LCT115123008	15	12	30	8
LCT111122608	11	12	26	8	LCT115123208	15	12	32	8
LCT111122808	11	12	28	8	LCT115123308	15	12	33	8

(單位：mm)

製造廠名稱：尚品醫療器材股份有限公司委託禾祺銳生技股份有限公司製造

製造廠地址：新北市新店區中正路四維巷6號4樓

藥商名稱：尚品醫療器材股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)